

2022年5月10日

日本メディカルネクスト株式会社

## 「イージーウォーターヒュミディファイヤー」安全使用に関するご案内

弊社取扱い製品「イージーウォーターヒュミディファイヤー」に関しまして、イージーウォーター（以下、ボトル）及びイージーウォーターヒュミディファイヤーアダプター（以下、アダプター）を接続使用時に、リーク事例が報告されました。

原因としては、ボトルとアダプターの接続状態が適切でないことによる、内部嵌合不良と考えられます。嵌合不良によるリークを防止すべく、接続後は下記のリークチェックを行っていただき、漏れがないことを確認してからご使用くださいますようお願い申し上げます。

### 記

■ ボトルとアダプターを接続する際は、台の上など安定した状態で行ってください。不安定な状態で接続すると、アダプターとボトルの嵌合不良となり、隙間から酸素が漏れるおそれがあります。

■ 接続後は、下記のリークチェックを行っていただき、漏れがないことを確認してください。

- ① 1L/分の流量の酸素を流し、酸素チューブ接続ポートを塞ぐ  
（ポートを塞ぐ際は手袋を着用）
- ② その状態で10～15秒間待ち、以下の3つの現象のうち2つ以上を確認してください。  
確認できたらリークチェック完了（PASS）です。3つの現象はほぼ同時に確認できます。
  - I. アダプターから笛吹音（ピーという音）が鳴ること
  - II. ボトルが膨張すること
  - III. ボトル内の気泡がなくなること

詳細につきましては弊社営業担当よりご案内申し上げます。ご不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

### 【本件に関するお問合せ先】

- 使用方法等に関するお問い合わせ  
札幌 011-622-4361      仙台 022-299-2371  
関東 048-642-3360      東京 03-5665-2780  
名古屋 052-242-5201      大阪 06 - 6862 - 8552  
広島 082-270-3071      福岡 092-622-7730
- その他お問い合わせ  
品質保証部 安全管理グループ 樋笠(ひがさ)／北村  
電話：06-6867-3011 Fax：06-6867-3006

以上