


テレスコープブリッジ

【形状・構造及び原理等】

※代表的な形状を下記に示す。

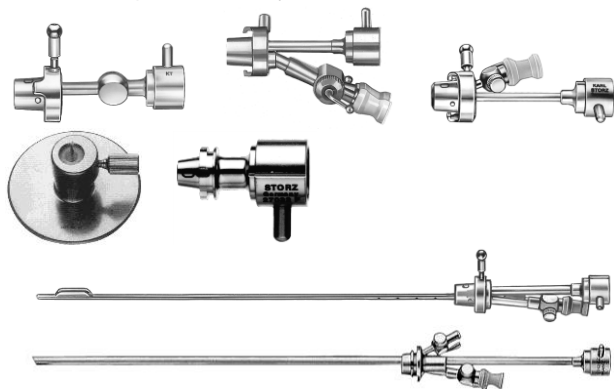

原材料:ステンレス鋼※、銅合金/クロム鍍金※、
ニッケル銅合金/クロム鍍金※
※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

【使用目的又は効果】**

本品は、硬性鏡と外管を接続するためのコンポーネントで、鉗子等を入
入するための器械チャンネルがあるタイプとないタイプがある。

【使用方法等】**

1. 使用前に所定の方法で滅菌を行う。
2. 本器具後部から内視鏡を挿入し、ロックする。
3. 本器具前部に外管を接続する。
4. 内視鏡及び外管を接続した状態で体内に挿入し、目的の処置を行う。
5. 必要に応じて、器械チャンネルから処置具を挿入する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 滅菌は常に同一の方法で行うことを推奨する。[異なる滅菌方法を実
施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・損傷を招き、故障につな
がる可能性が高い]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 灌流液が漏れないよう器械チャンネルには必ずゴムキャップを使用す
る。
2. 器械チャンネルを使用しない場合、必ずコックを閉めておくこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. よく洗浄後、必ず乾燥させてから保管すること。
2. 水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】**

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正
常かつ安全に作動することを確認すること。（特に体内
に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）
2. 器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄す
ること。[付着物は修復不能な損傷の原因になる]
3. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので
汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

5. 洗浄方法

(1) 自動洗浄器

- ① 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用
し、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用す
ること。
- ② 適切なラック(K39219 又は K39501 シリーズ)を使用し、他の器
具と重なり合わないように入れること。[他の器具と重なり合う
ことにより損傷の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効
果が減衰する]
- ③ 器具の接続部を開放し、ストップコックやシーリングを分解して
ラックに入れること。
- ④ 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、
器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中
止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

(2) 超音波洗浄器

- ① プラスチック等軟性部品には使用しないこと。[超音波振動を
吸収するためには効果が無いのみならず、材質の劣化を促
進する可能性がある]

(3) マニュアル洗浄

- ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により
手洗い洗浄を行う。
- ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水
エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
- ③ 管腔内を洗浄するため適切なブラシ(K27650 シリーズ)やクリ
ーニングピストル(K27660)を準備すること。
- ④ 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容
器(K27645 等)を準備すること。
- ⑤ 洗浄手順
 - a. ストップコックやシーリング等、器具の接続部をすべて分解
する。
 - b. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。水温
は 35～40℃前後(暖かいと感じる温度)が適温である。薬
剤による器具の損傷の可能性がある為、溶液には 60 分以
上浸漬したままにしないこと。
 - c. スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
 - d. 管腔内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗
浄する。
 - e. 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
 - f. 埃の出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。

6. 洗浄後の器具の点検とお手入れ

- (1) 外観の目視(特に体内に入る部分は入念に)確認、可動部の機
能確認を行うこと。(異常が見られたら使用を中止し、交換するこ
と。)
- (2) プラスチック又はシリコーン部品の変色・変質・柔軟性(硬化の有
無)・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を
交換すること。
- (3) ストップコックの接触面に専用グリス(K27657)を必ず塗布するこ
と。
- (4) 本品の可動部分には、滅菌による熱損傷を防止する為、専用オイ
ル(K27656B)を必ず塗布すること。

7. 洗浄剤

- (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸
性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。[材質に損傷を与
える可能性が高い]
- (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄
する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純
水にて十分に濯ぎを行うこと。
- (3) 内視鏡および内視鏡関連器具に適した洗浄剤又は消毒剤を使用
すること。

8. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。

注:滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。

(1) エチレンオキシドガス滅菌方法

本品を滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。

＜滅菌条件①＞

- ・ガス混合物 : エチレンオキシドガス 100%
- ・ガス濃度 : 725±30 mg/L
- ・温度 : 55 ℃
- ・湿度 : ≥70 %RH
- ・圧力 : 0.09 MPa
- ・時間 : 1～2 時間(滅菌機材による)

＜ガス抜去方法＞

51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。

(推奨 55℃で 12 時間)

又は

＜滅菌条件②＞

- ・ガス混合物 : エチレンオキシドガス 100%
- ・ガス濃度 : 600～700 mg/L
- ・温度 : 40～60 ℃
- ・湿度 : 50～60 %RH
- ・圧力 : 0.1 MPa
- ・時間 : 3～6 時間

＜ガス抜去方法＞

51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。

(推奨 55℃で 12 時間)

(2) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

- ・温度 : 134～137 ℃
- ・時間 : 4～18 分間

※真空式高圧蒸気滅菌(pre-high vacuum)方式のオートクレーブを推奨する。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

(3) プラズマ滅菌(ジョンソン・エンド・ジョンソン社/販売名「ステラット」100S、NX 又は 100NX)

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

- ・温度 : 約 45～55℃(機種による)
- ・湿度 : 約 10%RH
- ・時間 : 28～105 分(機種による)

(4) 薬液消毒方法

容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。

薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

＜消毒条件＞

- ・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*



エム・シー・メディカル株式会社

製造販売業者: エム・シー・メディカル株式会社

電話:03-5715-2800 (代表)

製造業者: カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co. KG)

国名:ドイツ